

GUIDE D'AJUSTEMENT

SUIVEZ CES TROIS ÉTAPES FACILES
POUR UN AJUSTEMENT RÉUSSI

Alcon



OFFREZ À VOS PATIENTS ASTIGMATES UN CONFORT
EXCEPTIONNEL DU JOUR 1 AU JOUR 30^{1-3*}



Excellente protection
contre les dépôts^{4,5}



Humidité de longue durée à
la surface des lentilles^{6,7}



Stabilité rotationnelle
en 30 secondes⁸

* D'après des études cliniques menées sur les lentilles cornéennes
AIR OPTIX^{MD} for Astigmatism.



ÉTAPE 1 : SÉLECTION DES LENTILLES CORNÉENNES INITIALES

Après avoir effectué une nouvelle réfraction des lunettes, consulter le « **Tableau de conversion des puissances des lunettes à celles des lentilles cornéennes** » situé au verso afin de choisir la puissance des lentilles cornéennes initiales.

Remarque : Choisir l'axe qui se rapproche le plus de l'axe des lunettes.

Laisser la lentille cornéenne s'ajuster à l'œil et s'y stabiliser pendant 3 à 5 minutes.



ÉTAPE 2 : ÉVALUATION DE L'ORIENTATION ET DE LA ROTATION DES LENTILLES CORNÉENNES

Trouver les marques repères à 3, 6 et 9 h.

Déterminer le degré de rotation de la lentille et ne l'équilibrer que si l'acuité visuelle est réduite. Si la lentille a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, ajouter le degré de rotation à la réfraction des lunettes. Si la lentille a tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, soustraire le degré de rotation de la réfraction des lunettes.

Exemple :

Réfraction des lunettes :	-1,50 -1,25X170
Rotation de la lentille :	10° dans le sens des aiguilles d'une montre; 10° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Ordonnance finale des lentilles :	-1,50 -1,25X180 1,50 -1,25X160

Remarque : L'orientation finale des nouvelles lentilles sera la même que celle des lentilles d'origine (par exemple, si la lentille d'origine a tourné de 10° dans le sens des aiguilles d'une montre, la nouvelle lentille tournera également de 10° dans le sens des aiguilles d'une montre).



ÉTAPE 3 : ÉVALUATION DE L'ACUITÉ VISUELLE


Vérifier l'acuité visuelle et effectuer une surréfraction sphérique, un œil après l'autre. Si la surréfraction sphérique ne permet pas d'avoir une vision acceptable, effectuer une surréfraction sphéro-cylindrique et communiquer avec le service de consultation Alcon pour obtenir la bonne puissance de lentilles cornéennes.

AIR OPTIX^{MD} PLUS HYDRAGLYDE^{MD} FOR ASTIGMATISM

INFORMATION SUR LES LENTILLES CORNÉENNES

MATÉRIAU :	Silicone hydrogel, lotrafilcon B
SURFACE :	Technologie SmartShield ^{MD}
TENEUR EN EAU :	33 %
TEINTE DE MANIPULATION :	VISITINT ^{MD} bleu clair
DIAMÈTRE (mm) :	14,5
RAYON DE COURBURE (mm) :	8,7
ÉPAISSEUR DU CENTRE (mm) :	0,102 mm à -3,00
MARQUES REPÈRES :	Marques repères à 3, 6 et 9 h
CONCEPTION :	Precision Balance 8 4 ^{MD}
CALENDRIER DE PORT ET DE REMPLACEMENT :	Port quotidien et port prolongé allant jusqu'à 6 nuits et remplacement une fois par mois
ENTRETIEN RECOMMANDÉ DES LENTILLES	Solution OPTI-FREE ^{MD} PureMoist ^{MD} ou solution nettoyante et désinfectante Clear Care ^{MD} Plus
FORMATS DES EMBALLAGES :	1 lentille/Format à la vente : 6 unités par boîte

PUISSANCE SPHÉRIQUE	PUISSANCE CYLINDRIQUE	AXIS
+6,00 à -6,00D (par incréments de 0,25)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25	360 degrés (par incréments de 10 degrés)
-6,50 à -10,00D (par incréments de 0,50)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25	360 degrés (par incréments de 10 degrés)

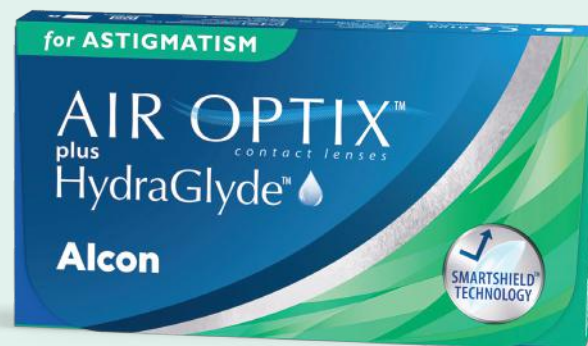

**AUCUN NOUVEL AJUSTEMENT NÉCESSAIRE
POUR LES LENTILLES AIR OPTIX^{MD} FOR ASTIGMATISM
SAUF SI L'ORDONNANCE A ÉTÉ MODIFIÉE.**

Visitez le site myalconstore.ca pour obtenir de plus amples renseignements

TABLEAU DE CONVERSION DES PUISSANCES DES LUNETTES À CELLES DES LENTILLES CORNÉENNES

Puissance cylindrique des lunettes

Correction verre-œil 12 mm	-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00
	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl
-11,50		-10,00 -0,75	-10,00 -0,75	-10,00 -1,25	-10,00 -1,25	-10,00 -1,25	-10,00 -1,75	-10,00 -1,75	-10,00 -1,75	-10,00 -2,25
-11,25	-10,00 sph	-10,00 -0,75	-10,00 -0,75	-10,00 -1,25	-10,00 -1,25	-10,00 -1,25	-10,00 -1,75	-10,00 -1,75	-10,00 -1,75	-10,00 -2,25
-11,00	-10,00 sph	-9,50 -0,75	-9,50 -0,75	-9,50 -1,25	-9,50 -1,25	-9,50 -1,25	-9,50 -1,75	-9,50 -1,75	-9,50 -1,75	-9,50 -2,25
-10,75	-10,00 sph	-9,50 -0,75	-9,50 -0,75	-9,50 -1,25	-9,50 -1,25	-9,50 -1,25	-9,50 -1,75	-9,50 -1,75	-9,50 -1,75	-9,50 -2,25
-10,50	-9,50 sph	-9,00 -0,75	-9,00 -0,75	-9,00 -1,25	-9,00 -1,25	-9,00 -1,25	-9,00 -1,75	-9,00 -1,75	-9,00 -1,75	-9,00 -2,25
-10,25	-9,50 sph	-9,00 -0,75	-9,00 -0,75	-9,00 -1,25	-9,00 -1,25	-9,00 -1,25	-9,00 -1,75	-9,00 -1,75	-9,00 -1,75	-9,00 -2,25
-10,00	-9,00 sph	-9,00 -0,75	-9,00 -0,75	-9,00 -1,25	-9,00 -1,25	-9,00 -1,25	-9,00 -1,75	-9,00 -1,75	-9,00 -1,75	-9,00 -2,25
-9,75	-9,00 sph	-8,50 -0,75	-8,50 -0,75	-8,50 -1,25	-8,50 -1,25	-8,50 -1,25	-8,50 -1,75	-8,50 -1,75	-8,50 -1,75	-8,50 -2,25
-9,50	-8,50 sph	-8,50 -0,75	-8,50 -0,75	-8,50 -1,25	-8,50 -1,25	-8,50 -1,25	-8,50 -1,75	-8,50 -1,75	-8,50 -1,75	-8,50 -2,25
-9,25	-8,50 sph	-8,50 -0,75	-8,50 -0,75	-8,50 -1,25	-8,50 -1,25	-8,50 -1,25	-8,50 -1,75	-8,50 -1,75	-8,50 -1,75	-8,50 -2,25
-9,00	-8,00 -0,75	-8,00 -0,75	-8,00 -0,75	-8,00 -1,25	-8,00 -1,25	-8,00 -1,25	-8,00 -1,75	-8,00 -1,75	-8,00 -1,75	-8,00 -2,25
-8,75	-8,00 -0,75	-8,00 -0,75	-8,00 -0,75	-8,00 -1,25	-8,00 -1,25	-8,00 -1,25	-8,00 -1,75	-8,00 -1,75	-8,00 -1,75	-8,00 -2,25
-8,50	-7,50 -0,75	-7,50 -0,75	-7,50 -0,75	-7,50 -1,25	-7,50 -1,25	-7,50 -1,25	-7,50 -1,75	-7,50 -1,75	-7,50 -1,75	-7,50 -2,25
-8,25	-7,50 -0,75	-7,50 -0,75	-7,50 -0,75	-7,50 -1,25	-7,50 -1,25	-7,50 -1,25	-7,50 -1,75	-7,50 -1,75	-7,50 -1,75	-7,50 -2,25
-8,00	-7,50 -0,75	-7,50 -0,75	-7,50 -0,75	-7,50 -1,25	-7,50 -1,25	-7,50 -1,25	-7,50 -1,75	-7,50 -1,75	-7,50 -1,75	-7,50 -2,25
-7,75	-7,00 -0,75	-7,00 -0,75	-7,00 -0,75	-7,00 -1,25	-7,00 -1,25	-7,00 -1,25	-7,00 -1,75	-7,00 -1,75	-7,00 -1,75	-7,00 -2,25
-7,50	-7,00 -0,75	-7,00 -0,75	-7,00 -0,75	-7,00 -1,25	-7,00 -1,25	-7,00 -1,25	-7,00 -1,75	-7,00 -1,75	-7,00 -1,75	-7,00 -2,25
-7,25	-7,00 -0,75	-6,50 -0,75	-6,50 -0,75	-6,50 -1,25	-6,50 -1,25	-6,50 -1,25	-6,50 -1,75	-6,50 -1,75	-6,50 -1,75	-6,50 -2,25
-7,00	-6,50 -0,75	-6,50 -0,75	-6,50 -0,75	-6,50 -1,25	-6,50 -1,25	-6,50 -1,25	-6,50 -1,75	-6,50 -1,75	-6,50 -1,75	-6,50 -2,25
-6,75	-6,50 -0,75	-6,00 -0,75	-6,00 -0,75	-6,00 -1,25	-6,00 -1,25	-6,00 -1,25	-6,00 -1,75	-6,00 -1,75	-6,00 -1,75	-6,00 -2,25
-6,50	-6,00 -0,75	-6,00 -0,75	-6,00 -0,75	-6,00 -1,25	-6,00 -1,25	-6,00 -1,25	-6,00 -1,75	-6,00 -1,75	-6,00 -1,75	-6,00 -2,25
-6,25	-5,75 -0,75	-5,75 -0,75	-5,75 -0,75	-5,75 -1,25	-5,75 -1,25	-5,75 -1,25	-5,75 -1,75	-5,75 -1,75	-5,75 -1,75	-5,75 -2,25
-6,00	-5,50 -0,75	-5,50 -0,75	-5,50 -0,75	-5,50 -1,25	-5,50 -1,25	-5,50 -1,25	-5,50 -1,75	-5,50 -1,75	-5,50 -1,75	-5,50 -2,25
-5,75	-5,50 -0,75	-5,50 -0,75	-5,50 -0,75	-5,50 -1,25	-5,50 -1,25	-5,50 -1,25	-5,50 -1,75	-5,50 -1,75	-5,50 -1,75	-5,50 -2,25
-5,50	-5,25 -0,75	-5,25 -0,75	-5,25 -0,75	-5,25 -1,25	-5,25 -1,25	-5,25 -1,25	-5,25 -1,75	-5,25 -1,75	-5,25 -1,75	-5,00 -2,25
-5,25	-5,00 -0,75	-5,00 -0,75	-5,00 -0,75	-5,00 -1,25	-5,00 -1,25	-5,00 -1,25	-5,00 -1,75	-5,00 -1,75	-5,00 -1,75	-5,00 -2,25
-5,00	-4,75 -0,75	-4,75 -0,75	-4,75 -0,75	-4,75 -1,25	-4,75 -1,25	-4,75 -1,25	-4,75 -1,75	-5,00 -1,75	-4,75 -2,25	-4,75 -2,25
-4,75	-4,50 -0,75	-4,50 -0,75	-4,50 -0,75	-4,50 -1,25	-4,50 -1,25	-4,50 -1,25	-4,50 -1,75	-4,50 -1,75	-4,50 -1,75	-4,50 -2,25
-4,50	-4,25 -0,75	-4,25 -0,75	-4,50 -0,75	-4,25 -1,25	-4,25 -1,25	-4,25 -1,25	-4,25 -1,75	-4,25 -1,75	-4,25 -2,25	-4,25 -2,25
-4,25	-4,00 -0,75	-4,00 -0,75	-4,25 -0,75	-4,00 -1,25	-4,00 -1,25	-4,00 -1,25	-4,00 -1,75	-4,00 -1,75	-4,00 -2,25	-4,25 -2,25
-4,00	-4,00 -0,75	-4,00 -0,75	-4,00 -0,75	-4,00 -1,25	-4,00 -1,25	-4,00 -1,25	-4,00 -1,75	-4,00 -1,75	-4,00 -2,25	-4,00 -2,25
-3,75	-3,75 -0,75	-3,75 -0,75	-3,75 -0,75	-3,75 -1,25	-3,75 -1,25	-3,75 -1,25	-3,75 -1,75	-3,75 -1,75	-3,75 -2,25	-4,00 -2,25
-3,50	-3,50 -0,75	-3,50 -0,75	-3,50 -0,75	-3,50 -1,25	-3,50 -1,25	-3,50 -1,25	-3,50 -1,75	-3,50 -1,75	-3,50 -2,25	-3,75 -2,25
-3,25	-3,25 -0,75	-3,25 -0,75	-3,25 -0,75	-3,25 -1,25	-3,25 -1,25	-3,25 -1,25	-3,25 -1,75	-3,25 -1,75	-3,25 -2,25	-3,50 -2,25
-3,00	-3,00 -0,75	-3,00 -0,75	-3,00 -0,75	-3,00 -1,25	-3,00 -1,25	-3,00 -1,25	-3,00 -1,75	-3,00 -1,75	-3,00 -2,25	-3,25 -2,25
-2,75	-2,75 -0,75	-2,75 -0,75	-2,75 -1,25	-2,75 -1,25	-2,75 -1,25	-2,75 -1,25	-2,75 -1,75	-2,75 -2,25	-2,75 -2,25	-3,00 -2,25
-2,50	-2,50 -0,75	-2,50 -0,75	-2,50 -1,25	-2,50 -1,25	-2,50 -1,25	-2,50 -1,25	-2,50 -1,75	-2,50 -1,75	-2,50 -2,25	-2,75 -2,25
-2,25	-2,25 -0,75	-2,25 -0,75	-2,25 -1,25	-2,25 -1,25	-2,25 -1,25	-2,25 -1,25	-2,25 -1,75	-2,25 -1,75	-2,25 -2,25	-2,50 -2,25
-2,00	-2,00 -0,75	-2,00 -0,75	-2,00 -1,25	-2,00 -1,25	-2,00 -1,25	-2,00 -1,25	-2,00 -1,75	-2,00 -1,75	-2,00 -2,25	-2,25 -2,25
-1,75	-1,75 -0,75	-1,75 -0,75	-1,75 -1,25	-1,75 -1,25	-1,75 -1,25	-1,75 -1,25	-1,75 -1,75	-1,75 -2,25	-1,75 -2,25	-2,00 -2,25
-1,50	-1,50 -0,75	-1,50 -0,75	-1,50 -1,25	-1,50 -1,25	-1,50 -1,25	-1,50 -1,25	-1,50 -1,75	-1,50 -2,25	-1,50 -2,25	-1,75 -2,25
-1,25	-1,25 -0,75	-1,25 -0,75	-1,25 -1,25	-1,25 -1,25	-1,25 -1,25	-1,25 -1,25	-1,25 -1,75	-1,25 -2,25	-1,25 -2,25	-1,50 -2,25
-1,00	-1,00 -0,75	-1,00 -0,75	-1,00 -1,25	-1,00 -1,25	-1,00 -1,25	-1,00 -1,25	-1,00 -1,75	-1,00 -2,25	-1,00 -2,25	-1,25 -2,25
-0,75	-0,75 -0,75	-0,75 -0,75	-0,75 -1,25	-0,75 -1,25	-0,75 -1,25	-0,75 -1,25	-0,75 -1,75	-0,75 -2,25	-0,75 -2,25	-1,00 -2,25
-0,50	-0,50 -0,75	-0,50 -0,75	-0,50 -1,25	-0,50 -1,25	-0,50 -1,25	-0,50 -1,25	-0,50 -1,75	-0,50 -2,25	-0,50 -2,25	-0,75 -2,25
-0,25	-0,25 -0,75	-0,25 -0,75	-0,25 -1,25	-0,25 -1,25	-0,25 -1,25	-0,25 -1,25	-0,25 -1,75	-0,25 -2,25	-0,25 -2,25	-0,50 -2,25
+0,00	+0,00 -0,75	+0,00 -0,75	+0,00 -1,25	+0,00 -1,25	+0,00 -1,25	+0,00 -1,25	+0,00 -1,75	+0,00 -2,25	+0,00 -2,25	-0,25 -2,25
+0,25	+0,25 -0,75	+0,25 -0,75	+0,25 -1,25	+0,25 -1,25	+0,25 -1,25	+0,25 -1,25	+0,25 -1,75	+0,25 -2,25	+0,25 -2,25	+0,00 -2,25
+0,50	+0,50 -0,75	+0,50 -0,75	+0,50 -1,25	+0,50 -1,25	+0,50 -1,25	+0,50 -1,25	+0,50 -1,75	+0,50 -2,25	+0,50 -2,25	+0,25 -2,25
+0,75	+0,75 -0,75	+0,75 -0,75	+0,75 -1,25	+0,75 -1,25	+0,75 -1,25	+0,75 -1,25	+0,75 -1,75	+0,75 -2,25	+0,75 -2,25	+0,50 -2,25
+1,00	+1,00 -0,75	+1,00 -0,75	+1,00 -1,25	+1,00 -1,25	+1,00 -1,25	+1,00 -1,25	+1,00 -1,75	+1,00 -2,25	+1,00 -2,25	+0,75 -2,25
+1,25	+1,25 -0,75	+1,25 -0,75	+1,25 -1,25	+1,25 -1,25	+1,25 -1,25	+1,25 -1,25	+1,25 -1,75	+1,25 -2,25	+1,25 -2,25	+1,00 -2,25
+1,50	+1,50 -0,75	+1,50 -0,75	+1,50 -1,25	+1,50 -1,25	+1,50 -1,25	+1,50 -1,25	+1,50 -1,75	+1,50 -2,25	+1,50 -2,25	+1,25 -2,25
+1,75	+1,75 -0,75	+1,75 -0,75	+1,75 -1,25	+1,75 -1,25	+1,75 -1,25	+1,75 -1,25	+1,75 -1,75	+1,75 -2,25	+1,75 -2,25	+1,50 -2,25
+2,00	+2,00 -0,75	+2,00 -0,75	+2,00 -1,25	+2,00 -1,25	+2,00 -1,25	+2,00 -1,25	+2,00 -1,75	+2,00 -2,25	+2,00 -2,25	+1,75 -2,25
+2,25	+2,25 -0,75	+2,25 -0,75	+2,25 -1,25	+2,25 -1,25	+2,25 -1,25	+2,25 -1,25	+2,25 -1,75	+2,25 -2,25	+2,25 -2,25	+2,00 -2,25
+2,50	+2,50 -0,75	+2,50 -0,75	+2,50 -1,25	+2,50 -1,25	+2,50 -1,25	+2,50 -1,25	+2,50 -1,75	+2,50 -2,25	+2,50 -2,25	+2,25 -2,25
+2,75	+2,75 -0,75	+2,75 -0,75	+2,75 -1,25	+2,75 -1,25	+2,75 -1,25	+2,75 -1,25	+2,75 -1,75	+2,75 -2,25	+2,75 -2,25	+2,50 -2,25
+3,00	+3,00 -0,75	+3,00 -0,75	+3,00 -1,25	+3,00 -1,25	+3,00 -1,25	+3,00 -1,25	+3,00 -1,75	+3,00 -2,25	+3,00 -2,25	+2,75 -2,25
+3,25	+3,25 -0,75	+3,25 -0,75	+3,25 -1,25	+3,25 -1,25	+3,25 -1,25	+3,25 -1,25	+3,25 -1,75	+3,25 -2,25	+3,25 -2,25	+2,75 -2,25
+3,50	+3,50 -0,75	+3,50 -0,75	+3,50 -1,25	+3,50 -1,25	+3,50 -1,25	+3,50 -1,25	+3,50 -1,75	+3,50 -2,25	+3,50 -2,25	+3,00 -2,25
+3,75	+3,75 -0,75	+3,75 -0,75	+3,75 -1,25	+3,75 -1,25	+3,75 -1,25	+3,75 -1,25	+3,75 -1,75	+3,75 -2,25	+3,75 -2,25	+3,25 -2,25
+4,00	+4,00 -0,75	+4,00 -0,75	+4,00 -1,25	+4,00 -1,25	+4,00 -1,25	+4,00 -1,25	+4,00 -1,75	+4,00 -2,25	+4,00 -2,25	+3,75 -2,25
+4,25	+4,50 -0,75	+4,50 -0,75	+4,50 -1,25	+4,50 -1,25	+4,50 -1,25	+4,50 -1,25	+4,50 -1,75	+4,50 -2,25	+4,50 -2,25	+4,00 -2,25
+4,50	+4,75 -0,75	+4,75 -0,75	+4,75 -1,25	+4,75 -1,25	+4,75 -1,25	+4,75 -1,25	+4,75 -1,75	+4,75 -2,25	+4,75 -2,25	+4,25 -2,25
+4,75	+5,00 -0,75	+5,00 -0,75	+5,00 -1,25	+5,00 -1,25	+5,00 -1,25	+5,00 -1,25	+5,00 -1,75	+5,00 -2,25	+5,00 -2,25	+4,75 -2,25
+5,00	+5,25 -0,75	+5,25 -0,75	+5,25 -1,25	+5,25 -1,25	+5,25 -1,25	+5,25 -1,25	+5,25 -1,75	+5,25 -2,25	+5,25 -2,25	+4,75 -2,25
+5,25	+5,50 -0,75	+5,50 -0,75	+5,50 -1,25	+5,50 -1,25	+5,50 -1,25	+5,50 -1,25	+5,50 -1,75	+5,50 -2,25	+5,50 -2,25	+5,00 -2,25
+5,50	+5,75 -0,75	+5,75 -0,75	+5,75 -1,25	+5,75 -1,25	+5,75 -1,25	+5,75 -1,25	+5,75 -1,75	+5,75 -2,25	+5,75 -2,25	+5,25 -2,25
+5,75	+6,00 -0,75	+6,00 -0,75	+6,00 -1,25	+6,00 -1,25	+6,00 -1,25	+6,00 -1,25	+6,00 -1,75	+6,00 -2,25	+6,00 -2,25	+5,50 -2,25
	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl	sph cyl

Puissance sphérique des lunettes

COMMENT UTILISER LA GRILLE DE SÉLECTION DES LENTILLES AIR OPTIX^{MD} PLUS HYDRAGLYDE^{MD} FOR ASTIGMATISM

REMARQUE : IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'APPORTER DES CORRECTIONS EN FONCTION DE LA DISTANCE VERRE-ŒIL, PUISQUE CELLES-CI SONT PRISES EN COMPTE DANS LE TABLEAU.

1. Trouver la puissance sphérique des lunettes du porteur sur l'ordonnance des lunettes. Elle est indiquée à gauche sous « puissances sphériques des lunettes ».
2. Trouver la puissance des lentilles cornéennes d'essai AIR OPTIX^{MD} plus HydraGlyde^{MD} for Astigmatism. Elle est indiquée sous la puissance cylindrique négative des lunettes sur l'ordonnance des lunettes du porteur.
3. Pour les lentilles cornéennes d'essai, choisir les lentilles cornéennes AIR OPTIX^{MD} plus HydraGlyde^{MD} for Astigmatism dont l'axe se rapproche le plus de l'axe de réfraction ou de l'axe indiqué sur l'ordonnance des lunettes.
4. Lors de la commande des lentilles cornéennes finales, tenir compte de la rotation des lentilles cornéennes si nécessaire.

Références : 1. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort, and vision. Eye Contact Lens. 2013;39(4):290-294. 2. Lemp J, Kern J. A comparison of real time and recall comfort assessments. Optom Vis Sci. 2016;93: Résumé électronique 165256. 3. D'après une étude clinique de 30 jours menée auprès de 75 personnes ayant l'habitude de porter des lentilles composées de lotrafilcon B; données internes d'Alcon, 2017. 4. Nash WL, Gabriel M, Mowrey-McKee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87: Résumé électronique 105110. 5. Nash WL, Gabriel MM. Ex vivo analysis of cholesterol deposition for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fluorometric enzymatic assay. Eye Contact Lens. 2014;40(5):277-282. 6. Étude in vitro visant à mesurer la substantivité de l'agent mouillant sur une période de 16 heures; données internes d'Alcon, 2015. 7. Muya L, Lemp J, Kern JR, Senell KB, Lane J, Perry SS. Impact of packaging saline wetting agents on wetting substantivity and lubricity. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57: résumé électronique 1463. 8. Dans le cadre d'une étude clinique à l'insu, à répartition aléatoire et effectuée dans 11 établissements auprès de 83 patients; signification démontrée au niveau 0,05; données internes d'Alcon, 2006.

Voir l'information complète sur le port, l'entretien et la sécurité liés aux lentilles cornéennes. (Rix seulement)

Renseignements importants sur les lentilles cornéennes AIR OPTIX^{MD} FOR ASTIGMATISM (lotrafilcon B) : Pour un port quotidien ou un port prolongé pour un maximum de six nuits, pour une vision de loin ou de près, ou l'astigmatisme. Le port prolongé accroît le risque de problèmes oculaires graves (c.-à-d., ulcère cornéen). Dans