

Recommandez **Biofinity^{MD}** **toric** la lentille réputée pour sa conception et sa stabilité

Biofinity^{MD} toric, de même que Biofinity^{MD} XR toric, convient à pratiquement tous les patients astigmatiques. Biofinity^{MD} se distingue par sa qualité optique et son confort exceptionnels.




GÉOMÉTRIE OPTIMISÉE DE LA LENTILLE TORIQUE^{MC}

- 1 **Épaisseur ISO horizontale uniforme**
Simplifie le processus d'ajustement et procure une meilleure acuité visuelle.
- 2 **Large bande de ballast**
Assure un ajustement stable et confortable.
- 3 **Surface lisse et continue**
Maximise le confort pour l'utilisateur.
- 4 **Grande zone optique torique**
Procure une acuité visuelle claire dans une vaste gamme de puissances.
- 5 **Courbure de la surface arrière améliorée**
Réduit le mouvement de la lentille sur l'oeil, ce qui permet une stabilité et une fiabilité accrues.



TECHNOLOGIE AQUAFORM^{MD}

La technologie Aquaform^{MD} parvient à un équilibre optimal entre trois mesures clés de confort – ce qui contribue à maximiser la satisfaction du patient.

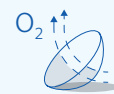

PERMÉABILITÉ

Transmissibilité élevée de l'oxygène

Lentille hautement perméable qui convient au port quotidien ou continu (29 nuits / 30 jours) et qui contribue à préserver la santé de la cornée.



MOUILLABILITÉ

Mouillabilité naturelle et uniforme

Lentille qui retient l'humidité, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des traitements de surface ou des agents hydratants, ce qui contribue à maximiser le confort.




SOUPLESE

Modulus optimal

Moins de silicone veut dire un modulus optimal. Le résultat : une lentille plus flexible.

TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS DE LA VUE

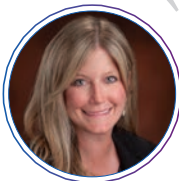

Avec Biofinity^{MD} toric, je suis assurée que la conception de la lentille offrira le **meilleur ajustement possible** et une **excellente qualité optique**, ce qui se traduira par une **plus grande satisfaction du patient**. Les patients me disent que Biofinity^{MD} toric procure une **vision exceptionnelle** et un **confort qui dure toute la journée**. Mais c'est la qualité de l'optique qui **fait pencher la balance!** Dès l'insertion des lentilles diagnostiques, les patients sont impressionnés par la **netteté de la vision**.

– Casey L. Hogan OD, FFAO, FSLs



Biofinity^{MD} toric est ma **lentille de choix** pour les patients astigmatiques qui apprécient tout particulièrement sa **stabilité** et son **confort**. Cette lentille procure une **vision nette** et peut être portée **toute la journée**. La large sélection de prescriptions, combinée au confort et à la performance de la lentille, fait de Biofinity^{MD} toric un choix évident pour **assurer la satisfaction des patients**.

– Melanie Frogozo, OD, FFAO



Biofinity^{MD} toric est la lentille torique que je préfère du fait qu'elle obtient **le taux de réussite le plus élevé à l'ajustement initial** et que **les patients l'adorent**. Biofinity^{MD} toric offre une **stabilité supérieure**, qui réduit la rotation et permet un ajustement rapide. Le matériau est très **confortable** et procure aux patients un confort qui dure toute la journée. Comme il s'agit de remplacement mensuel, les patients sont **plus susceptibles de se conformer au calendrier de port**.


– Ethan Huisman, OD, FFAO

APPROUVÉE AUSSI PAR LES PATIENTS




9 patients sur 10

sondés sont **satisfaits** de leurs lentilles Biofinity^{MD} toric²

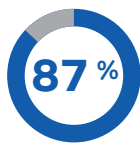

des patients sondés ont déclaré qu'à leur prochain rendez-vous, ils diraient à leur professionnel de la vue qu'ils **voulaient continuer à porter Biofinity^{MD} toric²**

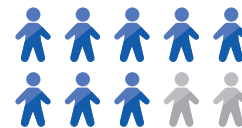


8 patients sur 10

sondés étaient d'accord ou fortement d'accord pour dire que de toutes les lentilles qu'ils avaient portées, Biofinity^{MD} toric était la **meilleure²**

BIOFINITY^{MD} TORIC – LA LENTILLE QUI A FAIT SES PREUVES ET SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

Biofinity^{MD} toric, de même que Biofinity^{MD} XR toric, est une lentille dont l'efficacité a été démontrée et qui est stable en tout temps. Comme elle est offerte dans une large sélection de prescriptions, elle convient à pratiquement tous les patients astigmatiques.

	Matériau	Technologie	Conception	Courbure de base (mm)	Diamètre (mm)	Épaisseur au centre (mm) à -3,00D	Paramètres	Dk/t à -3,00D	Teneur en eau (%)	Modulus (MPa)
Biofinity^{MD} toric	comfilcon A	Technologie Aquaform ^{MD}	Géométrie optimisée de la lentille torique ^{MC}	8,7	14,5	0,11	+8,00 à -10,00 (étapes de 0,50D après ± 6,00) Cyl. : -0,75, -1,25, -1,75, -2,25 Axe : 10° à 180° (étapes de 10°)	116	48	0,75
Biofinity^{MD} XR toric	comfilcon A	Technologie Aquaform ^{MD}	Géométrie optimisée de la lentille torique ^{MC}	8,7	14,5	0,11	+10,00 à +8,50 (étapes de 0,50D) +10,00 à -10,00 (étapes de 0,50D après ± 6,00) Cyl. : -0,75, -1,25, -1,75, -2,25, -2,75, -3,25, -3,75, -4,25, -4,75, -5,25, -5,75 Axe : 5° à 180° (étapes de 5°)	116	48	0,75

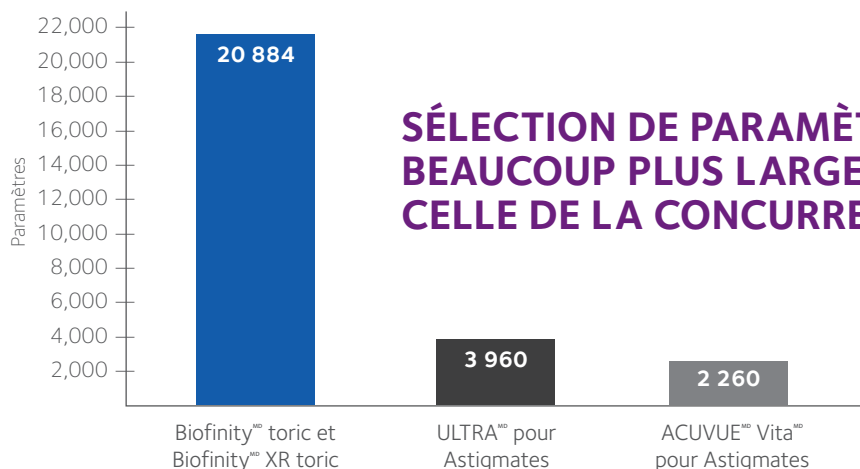

SÉLECTION DE PARAMÈTRES BEAUCOUP PLUS LARGE QUE CELLE DE LA CONCURRENCE

Biofinity^{MD} toric et Biofinity^{MD} XR toric sont approuvées pour le port quotidien ou le port continu jusqu'à 29 nuits et 30 jours.

NOUVEAUTÉ : OptiExpert^{MC}, un guide d'ajustement novateur offert en ligne

Pour en savoir plus sur Biofinity^{MD} toric et Biofinity^{MD} XR toric, allez à : www.coopervision.ca/fr



CooperVision^{MD}

RÉFÉRENCES : 1. Données relatives au secteur aux États-Unis au dossier. 2. Résultats d'un sondage en ligne auprès de patients qui ont porté Biofinity^{MD} toric. Sondage en ligne auprès de porteurs de Biofinity^{MD} toric, janvier 2018. Données au dossier.
© 2019 CooperVision, Inc. CooperVision^{MD}, Biofinity^{MD} et Aquaform^{MD} sont des marques déposées, et Biofinity Energys^{MD}, Digital Zone Optics^{MD} et Géométrie de la lentille torique^{MC} sont des marques de commerce, de The Cooper Companies, Inc., ses filiales ou sociétés affiliées.



coopervision.ca/fr
1 888 475 8555