

LENTILLES MULTIFOCALES BAUSCH + LOMB ULTRA^{MD} POUR L'ASTIGMATISME

OFFRE STANDARD

Aucune commande sur mesure. Les seules lentilles toriques multifocales à remplacement mensuel en silicone hydrogel proposées en offre standard.

PARAMÈTRES

MATÉRIEL :	samfilcon A
TECHNOLOGIE DU MATÉRIEL DE LENTILLE :	Technologie MoistureSeal ^{MD}
TENEUR EN EAU :	46 %
PERMÉABILITÉ À L'OXYGÈNE :	114 Dk
TECHNOLOGIE DE CONCEPTION DES LENTILLES :	Conception 3-Zone Progressive ^{MC} , conception OpticAlign ^{MD}
COURBURE DE BASE :	8,6 mm
DIAMÈTRE :	14,5 mm
PUISSANCES SPHÉRIQUES :	+4,00 D à -6,00 D par échelons de 0,25 D
PUISSANCES CYLINDRIQUES :	-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D
AXES :	10° à 180° par échelons de 10°
PUISSANCES D'ADDITION :	Faible : +0,75 D à +1,50 D Élevée : +1,75 D à +2,50 D
FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT :	Mensuel
ENTRETIEN RECOMMANDÉ DES LENTILLES :	Solution polyvalente Biotrue ^{MD}

PRESCRIVEZ LES LENTILLES MULTIFOCALES BAUSCH + LOMB ULTRA^{MD} POUR L'ASTIGMATISME

Créez un nouveau segment dans votre cabinet
avec les quatre types de patients potentiels suivants :



LENTILLES TORIQUES
MONOVISION



LENTILLES MULTIFOCALES
AVEC ASTIGMATISME NON
CORRIGÉ



LENTILLES TORIQUES AVEC
LUNETTES DE LECTURE



LUNETTES SEULEMENT

*n=502 consommateurs de 40 à 60 ans chez lesquels la presbytie et l'astigmatisme ont été diagnostiqués ou qui utilisent des lunettes de lecture.

RÉFÉRENCES : 1. SERMO RealTime. ECP survey of presbyopic astigmat vision correction (n=100). Avril 2019. 2. Données internes. Bausch & Lomb Incorporated. Rochester, New York.

Toujours indiquer au patient de lire et de suivre l'étiquette pour utiliser correctement le produit. Pour obtenir de l'information complète sur le produit, y compris les indications approuvées, les restrictions, les avertissements et les mises en garde, veuillez consulter la notice d'emballage du produit.

BAUSCH + LOMB
Mieux voir pour mieux vivre.

Bausch & Lomb Canada, Vaughan (Ontario) L4K 4B4
MBVMC désignent des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.
© Bausch Health, Canada inc. TP16571

STABLE. PRÉCISE. STANDARD.

LENTILLES MULTIFOCALES BAUSCH + LOMB ULTRA^{MD} POUR L'ASTIGMATISME

La première et l'unique lentille de sa catégorie proposée en offre standard.
Cette lentille évoluée combine la conception 3-Zone Progressive^{MC} et la conception
OpticAlign^{MD} pour offrir une vision précise et un ajustement stable.



BAUSCH + LOMB
Mieux voir pour mieux vivre.

CONSERVENT
95 %
 DE LEUR HUMIDITÉ
 PENDANT
16 HEURES
 COMPLÈTES²

Lorsqu'ils songent à une expérience réussie d'ajustement de lentille torique multifocale, les professionnels de la vue considèrent une rotation minimale comme étant le facteur le plus important¹.

AJUSTEMENT STABLE

La conception OpticAlign^{MD} fournit un ballast dans l'hémisphère inférieur afin de réduire la rotation de la lentille – **≤ 5° de rotation pour 95 % des patients²**.

RÉSULTATS CLINIQUES SUR LES YEUX^{2*}

Rotation, centrage optique et mouvement de la lentille multifocale Bausch + Lomb ULTRA^{MD} pour l'astigmatisme lors de la remise au patient

ROTATION		CENTRAGE OPTIQUE		MOUVEMENT	
0 À 5 DEGRÉS	95 %	EXCELLENT	86 %	ADÉQUAT	100 %
6 À 10 DEGRÉS	5 %	BON	14 %	EXCESSIF	0
11 À 15 DEGRÉS	0	PASSABLE	0	INSUFFISANT	0
> 16 DEGRÉS	0	MÉDIOCRE	0	ADHÉRENCE	0

*(n=42 eyes)

LENTILLES MULTIFOCALES BAUSCH + LOMB ULTRA^{MD} POUR L'ASTIGMATISME

Lorsqu'ils considèrent les résultats obtenus par les patients par le port de lentilles toriques multifocales, **les professionnels de la vue indiquent que la vision précise à toutes les distances est le facteur le plus important¹**.


VISION PRÉCISE

La conception 3-Zone Progressive^{MC} comprend trois zones de puissance distinctes pour offrir une vision exceptionnelle et des transitions précises pour toutes les distances.

CONCEPTION DE LENTILLES ÉPROUVÉE

Comme la lentille Bausch + Lomb ULTRA^{MD} pour la presbytie, cette lentille comporte de grandes zones de puissance cohérente de mise au point pour la vision de près, à une distance intermédiaire et de loin.

Lentilles multifocales Bausch + Lomb Ultra^{MD} pour l'astigmatisme

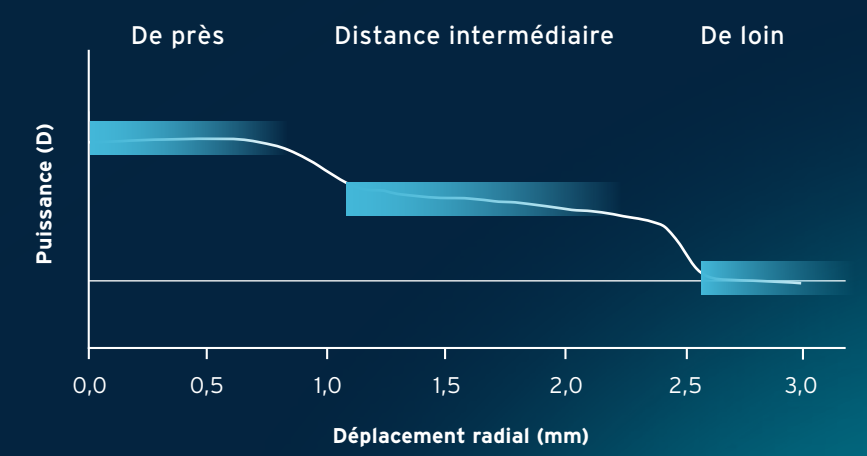

LENTILLES BAUSCH + LOMB ULTRA^{MD} MULTIFOCALES POUR ASTIGMATISME

PRÊT À ENCORE PLUS



La lentille conçue pour un ajustement réussi a dorénavant plus de paramètres, y compris les **cylindres de -2,25 D et -2,75 D**, en offre standard. Maintenant, vous pourrez ajuster plus de patients presbytes astigmatés que jamais auparavant.

BAUSCH + LOMB
Mieux voir pour mieux vivre.

LENTILLES BAUSCH + LOMB ULTRA^{MD} MULTIFOCALES POUR ASTIGMATISME

PLUS D'OPTIONS POUR PLUS DE PATIENTS

37 % plus de paramètres,
pour un total de plus
de 6000 paramètres,
en offre standard.



PARAMÈTRES		
MATÉRIAU :	samfilcon A	
TECHNOLOGIE DU MATÉRIAU DE LA LENTILLE :	Technologie MoistureSeal ^{MD}	
TENEUR EN EAU :	46 %	
PERMÉABILITÉ À L'OXYGÈNE :	114 Dk/e	
TECHNOLOGIE DE CONCEPTION DE LA LENTILLE :	Conception 3-Zone Progressive ^{MC} , Conception OpticAlign ^{MD}	
COURBURE DE BASE :	8,6 mm	
DIAMÈTRE :	14,5 mm	
PUISSANCES SPHÉRIQUES :	De +4,00 D à -6,00 D par échelon de 0,25 D	
PUISSANCES DU CYLINDRE :	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D	-2,25D, -2,75D NOUVEAU !
AXES :	De 10° à 180° par échelon de 10°	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
PUISSANCES D'ADDITION :	Faible : De +0,75 D à +1,50 D Élevée : De +1,75 D à +2,50 D	
CALENDRIER DE REMPLACEMENT :	Mensuelle	
HORAIRE DE PORT DES LENTILLES :	Jusqu'à 7 jours de port prolongé et en port quotidien	

Réservé à un usage professionnel. Toujours orienter le patient à lire l'étiquette et à suivre les directives afin d'utiliser correctement le produit. Pour les renseignements complets sur le produit, y compris l'indication approuvée, les restrictions, les précautions et les avertissements, veuillez vous reporter à la notice du produit.

Bausch & Lomb Canada, Vaughan, Ontario, L4K 4B4
MD/MC sont des marques commerciales de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses sociétés affiliées.
© 2021 Bausch Health, Canada Inc. TP18237d

BAUSCH + LOMB
Mieux voir pour mieux vivre.