

DES INNOVATIONS POUR DAVANTAGE DE PATIENTS

PARAMÈTRES DES LENTILLES

MATÉRIEL :	samfilcon A
TECHNOLOGIE DU MATÉRIEL DE LENTILLE :	Technologie MoistureSeal ^{MD}
TENEUR EN EAU :	46 %
PERMÉABILITÉ À L'OXYGÈNE :	114 Dk
TECHNOLOGIE DE CONCEPTION DES LENTILLES :	Conception 3-Zone Progressive ^{MC} , conception OpticAlign ^{MC}
COURBURE DE BASE :	8,6 mm
DIAMÈTRE :	14,5 mm
PUISSANCES SPHÉRIQUES :	+4,00 D à -6,00 D par échelons de 0,25 D
PUISSANCES CYLINDRIQUES :	-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D
AXES :	10° à 180° par échelons de 10°
PUISSANCES D'ADDITION :	Faible : +0,75 D à +1,50 D Élevée: +1,75 D à +2,50 D
TEINTE DE VISIBILITÉ :	Bleu clair
HORAIRE DE PORT :	Jusqu'à sept jours en port prolongé et en port quotidien
FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT :	Mensuel

Toujours indiquer au patient de lire et de suivre l'étiquette pour utiliser correctement le produit. Pour obtenir de l'information complète sur le produit, y compris les indications approuvées, les restrictions, les avertissements et les mises en garde, veuillez consulter la notice d'emballage du produit.

Bausch & Lomb Canada, Vaughan (Ontario) L4K 4B4
MD/MC désignent des marques de commerce de
Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.
© Bausch Health, Canada inc. TPI6570

BAUSCH + LOMB
Mieux voir pour mieux vivre.

B A U S C H + L O M B U L T R A^{MD}

LENTILLES MULTIFOCALES pour L'ASTIGMATISME

GUIDE D'AJUSTEMENT

- ÉTAPE 1 :** Mettre à jour la réfraction et la puissance d'addition des lunettes
- ÉTAPE 2 :** Sélectionner la puissance **de lentille torique** (ajustée pour la distance verre-œil au besoin)
- ÉTAPE 3 :** Sélectionner la **puissance d'addition** en suivant les conseils ci-dessous :

SÉLECTION DE L'ADDITION :

ADDITION DES LUNETTES

LES DEUX YEUX

+0,75 D à +1,50 D

Addition faible

+1,75 D à +2,50 D

Addition élevée

Consulter la notice d'emballage pour obtenir de plus amples renseignements.

ÉVALUER LE SUCCÈS DE LA LENTILLE

- Laisser aux lentilles d'essai le temps de s'équilibrer pendant au moins 10 minutes avant d'évaluer l'ajustement et la vision
- Confirmer l'orientation d'axe
- Évaluer la vision stéréoscopique de près et de loin dans des conditions normales d'éclairage
- Si la vision de près et de loin est satisfaisante, remettre les lentilles et prévoir un examen de suivi d'ici une à deux semaines



RAFFINER AU BESOIN

- Confirmer l'orientation d'axe
- Déterminer la dominance oculaire
- Suivre les conseils ci-dessous



VISION DE PRÈS				VISION DE LOIN				
DEUX ADDITIONS FAIBLES	ŒIL DOMINANT		ŒIL NON DOMINANT		ŒIL DOMINANT		ŒIL NON DOMINANT	
	Lentille initiale	Addition faible	Addition faible		Lentille initiale	Addition faible	Addition faible	
	Affinage 1	Addition faible	Addition élevée		Affinage 1	Lentille Bausch + Lomb ULTRA ^{MD} pour l'astigmatisme	Addition faible	
	Affinage 2 : Si la vision n'est toujours pas satisfaisante, apporter de petits changements en ajoutant une puissance de +0,25 D à la fois à l'œil non dominant (avec port de lentille à addition élevée) en utilisant des lentilles portables et continuer à évaluer la vision stéréoscopique dans des conditions normales d'éclairage. Ajuster la puissance de la lentille cornéenne quand la vision est satisfaisante.			Affinage 2 : Si la vision n'est toujours pas satisfaisante, apporter de petits changements en ajoutant une puissance de -0,25 D à la fois à l'œil dominant (avec port de lentille Bausch + Lomb ULTRA ^{MD} pour l'astigmatisme) en utilisant des lentilles portables et continuer à évaluer la vision stéréoscopique dans des conditions normales d'éclairage. Ajuster la puissance de la lentille cornéenne quand la vision est satisfaisante.				
DEUX ADDITIONS ÉLEVÉES	ŒIL DOMINANT		ŒIL NON DOMINANT		ŒIL DOMINANT		ŒIL NON DOMINANT	
	Lentille initiale	Addition élevée	Addition élevée		Lentille initiale	Addition élevée	Addition élevée	
	Affinage 1	Addition élevée	Ajouter +0,25 D à l'œil non dominant		Affinage 1	Addition faible	Addition élevée	
	Affinage 2 : Si la vision n'est toujours pas satisfaisante, apporter de petits changements en ajoutant une puissance de +0,25 D à la fois à l'œil non dominant en utilisant des lentilles portables et continuer à évaluer la vision stéréoscopique dans des conditions normales d'éclairage. Ajuster la puissance de lentille cornéenne lorsque la vision est satisfaisante.			Affinage 2 : Si la vision n'est toujours pas satisfaisante, apporter de petits changements en ajoutant une puissance de -0,25 D à la fois à l'oeil dominant (avec port de lentille à addition faible) en utilisant des lentilles portables et continuer à évaluer la vision stéréoscopique dans des conditions normales d'éclairage. Ajuster la puissance de la lentille cornéenne quand la vision est satisfaisante.				